



ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДЕЗІНФЕКЦІЇ АВТОМОБІЛЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

Область і спосіб застосування	Періодичність використання	Засіб	Концентрація і експозиція	Хто виконує
Поверхні (стеля, внутрішні частина та двері медичного салону, предмети обстановки та догляду за хворими, прилади)				
Миття і очистка	Щоденно та у випадку необхідності	Очищувачі Потужний, Універсальний	5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, змити водою. При стійких забрудненнях використовувати нерозведеними	Медичні сестри, санітари
Дезінфекція невеликих і важкодоступних поверхонь шляхом зрошування	Щоденно за необхідності: поверхні у приміщенні, предмети обстановки, інструменти простої конфігурації рівномірно зсирити засобом до повного зволоження	Фамідез® АФ Нью Фамідез® АФ Саноксіл 006	Бактерії: Фамідез® АФ Нью, нерозв. 30 с. Фамідез® АФ, нерозв. 2 хв. Саноксіл 006, нерозв. 15 хв. Туберкульоз: Фамідез® АФ, нерозв. 5 хв. Саноксіл 006, нерозв. 60 хв.	Медичні сестри, санітари
Дезінфекція поверхонь профілактична, поточна, заключна, предметів обстановки та догляду за хворими, приладів	Щоденно і за необхідності: знезаражувати поверхні протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу. Саноксіл 006 не потребує змивання водою з будь-яких поверхонь, Фамідез® Комбі – лише з тих, що не контактують із шкірою пацієнта або продуктами харчування	Саноксіл 006 Фамідез® Комбі	Бактерії і віруси: Саноксіл 006, нерозв. 15 хв. Фамідез® Комбі: 0,25% 30 хв. 0,5% 15 хв. Туберкульоз: Саноксіл 006, нерозв. 60 хв. Фамідез® Комбі: 0,25% 30 хв. 0,5% 15 хв.	Медичні сестри, санітари